

À LIRE AVANT TOUTE CHOSE !


Instructions de montage de l'IVEA 600S

Outils requis : Aucun Temps estimé : 5 minutes


IMPORTANT : Inspecter le dispositif afin de s'assurer de l'absence de dommages pendant le transport. En cas de dommages, NE PAS mettre le dispositif en service et appeler le service client de Stryker au : +1-800-327-0770.

IMPORTANT : Le système de roulettes comprend des roulettes à gauche et à droite marquées L et R, avec des pédales bleues et jaunes, et deux roulettes avant identiques avec seulement des pédales bleues qui se chevauchent. S'il n'est pas installé correctement, le système d'alignement SureTrek® ne fonctionnera pas.

1) Retirer du carton d'emballage les 4 roulettes et la boîte contenant les crochets à perfusion. Retirer l'IVEA de son emballage plastique et positionner le dispositif replié de manière à ce que la face inférieure des pieds soit tournée vers le haut.

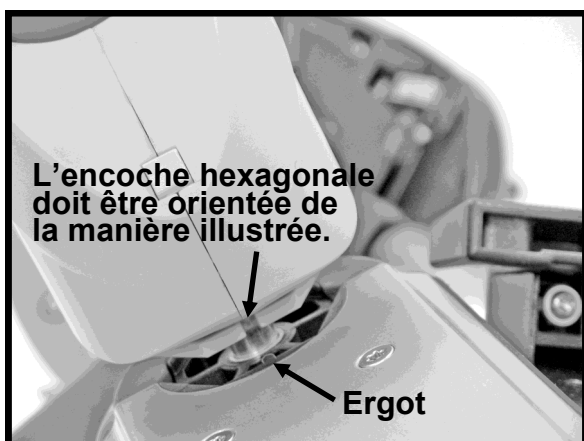

2) Repérer la roulette de pied marquée « L » sur la surface de l'hexagone. Enclencher le frein en enfonçant la pédale bleue. Insérer partiellement la tige de la roulette dans l'emboîture située à l'extrémité du pied **gauche**, qui se trouve du même côté que l'arceau pour bonbonne d'oxygène. Tourner la roulette jusqu'à ce que l'encoche dans l'hexagone soit positionnée exactement comme indiqué, dans l'alignement direct de « l'ergot » correspondant. Pousser complètement la roulette en position, en s'assurant que l'hexagone s'emboîte dans son emboîture. **L'hexagone ne s'engagera pas et le système d'alignement SureTrek® ne fonctionnera pas si l'encoche est mal orientée !**

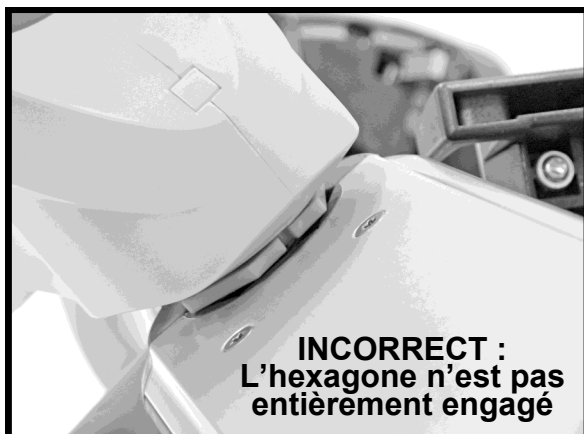

3) Répéter l'étape 2 avec la roulette du pied droit marquée « R », en s'assurant que l'encoche est orientée correctement et que l'hexagone est complètement emboîté.

4) Enclencher le frein d'une roulette avant en enfonçant la pédale bleue marquée « ON ». Insérer la tige de la roulette dans une emboîture à l'avant de l'IVEA. Tourner la roulette jusqu'à ce que les côtés de l'hexagone s'alignent avec l'emboîture, puis pousser complètement en position. **Il convient de remarquer que les roulettes avant n'ont pas d'encoches d'orientation.**



5) Répéter l'étape 4 avec la deuxième roulette avant.

6) Relâcher les freins des quatre roulettes en tirant sur les pédales bleues. **Déployer l'IVEA en suivant attentivement les instructions au dos de ce feuillet.** Lorsque les 4 roulettes sont correctement installées, l'IVEA déployé repose de façon stable sur le sol. En cas d'instabilité, vérifier que tous les hexagones de roulettes sont bien emboîtés.



Instructions — Ouverture de l'IVEA

Une fois que toutes les roulettes sont installées, déployer l'IVEA de la manière suivante : Poser l'unité repliée sur le sol. Soulever le haut de la colonne principale d'une main et appuyer légèrement vers le bas sur la partie arrière d'un pied, puis de l'autre, de l'autre main.



Lorsque les pieds commencent à s'éloigner de la colonne principale, l'IVEA s'ouvre tout seul. Soulever délicatement le haut de la colonne principale et guider l'IVEA jusqu'à ce qu'il émette un clic en position ouverte verrouillée.

Une fois l'IVEA déployé, installer les crochets à perfusion en enfonçant à fond les deux boutons à ressort à l'aide du pouce et de l'index tout en appuyant doucement vers le bas, dans la potence à perfusion. **Veiller à ne pas se pincer les doigts.** Les deux boutons doivent ressortir des trous de la potence à perfusion.

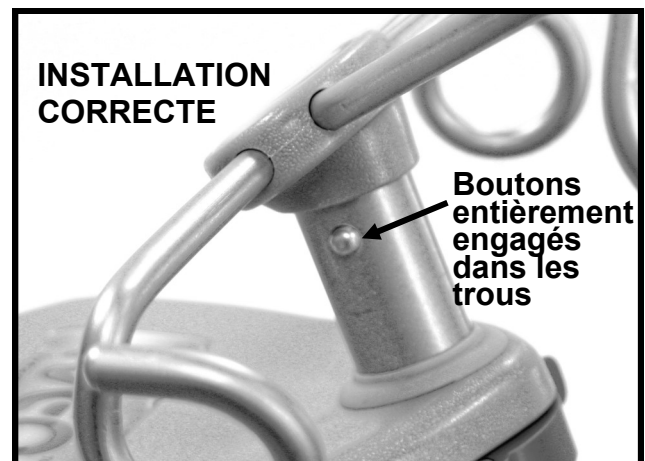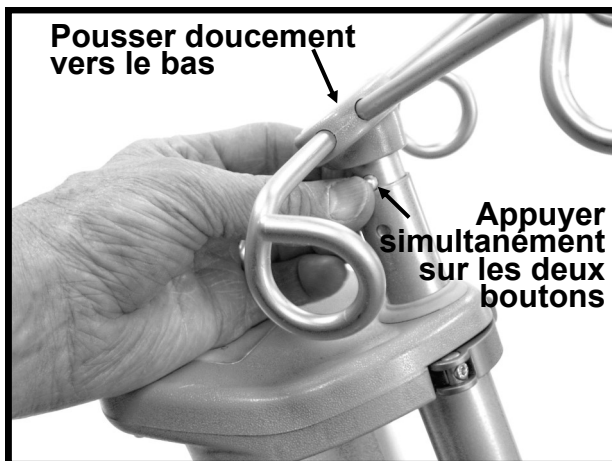

IMPORTANT ! Se reporter au manuel de l'utilisateur de l'IVEA 600S pour toutes les instructions d'utilisation, les avertissements et les mises en garde. Pour toute assistance technique, appeler Stryker au : +1-800-327-0770.